



ZERAMEX® P6 ZERABASE
La base per ricostruzioni personalizzate
in ceramica integrale

ZERAMEX® 



 swiss made

Scelga il metodo che preferisce per la ricostruzione personalizzata in ceramica integrale

Ricostruzioni avvitate in ceramica integrale

Con ZERAMEX® può abbinare la protesi al 100% priva di metallo a flussi di lavoro altamente efficienti. ZERAMEX® ZERABASE le offre la base per il suo abutment personalizzato per ricostruzioni avvitate occlusalmente. Lavori con il processo operativo che preferisce e utilizzi un software Exocad o 3Shape per i flussi di lavoro digitali.

Elevata flessibilità

- Progetti l'abutment secondo i suoi desideri
- La configurazione personalizzata consente un'estetica ottimale
- I residui di cemento possono essere rimossi con facilità e sicurezza, poiché il limite di preparazione può essere impostato in maniera ideale
- Configuri il moncone in modo da ottenere un appoggio ideale per la corona e un supporto stabile
- Adatto a ricostruzioni avvitate e cementate



Processi operativi

L'abutment ZERAMEX® ZERABASE le permette di lavorare con il processo operativo che preferisce.

Processo operativo tradizionale

- Preparare la ceratura per restauri pressati o fresati

Processo operativo digitale (progettazione digitale in software Exocad o 3Shape)

- Abutment lavorato → scansionare senza scanbody e creare la progettazione nel software
- Abutment non lavorato → scansionare con scanbody e creare la progettazione nel software

Produzione

La capetta o corona viene fresata in laboratorio da lei, nel centro di fresatura di sua scelta o alla poltrona.

Principali software

Gli abutment ZERAMEX® ZERABASE sono integrati nei sistemi di Exocad e 3Shape, leader del mercato.

Exocad: la libreria viene aggiornata automaticamente con gli abutment ZERAMEX® ZERABASE.

Eccezione: i sistemi di Zirkozahn e Amann Girrbach necessitano dell'importazione manuale dei file.

exocad

3Shape: carichi i file dal nostro sito web e li importi nel suo sistema.

3shape

Troverà tutti i file sul nostro sito web: www.zra.mx/cadcam

Ricostruzioni efficaci e flessibili con ZERAMEX® ZERABASE

Caratteristiche e vantaggi



ZERABASE



Scanbody

Abutment ZERABASE


- Connessione originale ZERAMEX® precisa e stabile per un'elevata stabilità
- Elemento ritentivo e fase per il collocamento preciso della cappetta o della corona
- Superfici adesive per il sostegno ottimale e l'adesione della ricostruzione

ZERAMEX® Scanbody


- Geometria ideale per un rilevamento digitale preciso
- Plastica stabile per uso multiplo in laboratorio
- Coppia di serraggio scanbody: max. 15Ncm

Informazioni: La preghiamo di non ritoccare il ZERAMEX® scanbody, poiché c'è il rischio che il sistema non possa più riconoscerlo.

Adeguate per l'indicazione desiderata

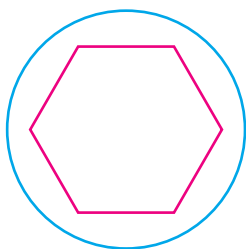

ZERABASE
per corona

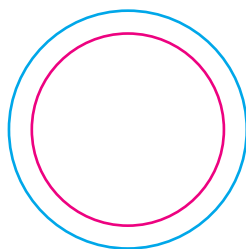

ZERABASE
per ponti e barre


ZERABASE per corone (engaging):

L'esagono garantisce la protezione antirotazione sull'impianto

ZERABASE per ponti e barre (non-engaging):

Connessione all'impianto tramite un appoggio circolare, senza esagono

Indicazioni di lavorazione e materiale

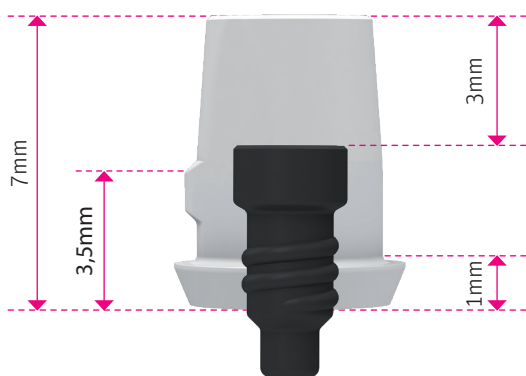

Indicazioni di lavorazione

- La parte conica può essere ridotta di 3mm, fino all'altezza della testa della vite
- Lavorare solo con buon raffreddamento continuo e con pressione leggera
- Utilizzare alta velocità di rotazione (turbina) e grana fine (diamante con anello rosso, più piccolo 50µm)
- Coppia di serraggio finale abutment (in laboratorio: usare la vite da laboratorio):
 - RN: 35Ncm
 - SN: 25Ncm
- WAK valore ZrO_2 ATZ: $9 \times 10^{-6}/K$
- Incollaggio con adesivo in commercio

Materiale

- Abutment ZERABASE: Biossido di zirconio, ATZ
- ZERAMEX® Scanbody: PEEK
- Vite: VICARBO (plastica rinforzata con fibra di carbonio)

Il portafoglio ZERAMEX® P6 CAD/CAM in sintesi

Cod. art.	Nome del prodotto	SN Ø 4,0mm	Cod. art.	Nome del prodotto	RN Ø 4.8mm
P15530	ZERAMEX® P6 ZERABASE SN, per corona (incl. vite)		P16530	ZERAMEX® P6 ZERABASE RN, per corona (incl. vite)	
P15531	ZERAMEX® P6 ZERABASE SN, per ponti / barre (incl. vite)		P16531	ZERAMEX® P6 ZERABASE RN, per ponti / barre (incl. vite)	
P35514	ZERAMEX® P6 Scanbody SN (incl. vite)		P36514	ZERAMEX® P6 Scanbody RN (incl. vite)	

ZERAMEX®

strong. bright. right.

Numero verde per ordinare DE/CH/AT

Tél. : 00800 93 55 66 37

Fax : 00800 93 55 63 77

order@zeramex.com



Sede centrale

Dentalpoint AG

Bodenackerstrasse 5

8957 Spreitenbach / Svizzera

Tél. : 0041 44 388 36 36

Fax : 0041 44 388 36 39



Filiale Europe

Dentalpoint Germany GmbH

Wallbrunnstrasse 24

79539 Lörrach / Germania

Tél. : 0049 7621 1612 749

Fax : 0049 7621 1612 780

info@zeramex.com

www.zeramex.com

© 2016 Dentalpoint AG — Tutti i diritti sono riservati.
ZERAMEX® è un marchio registrato di Dentalpoint AG.
Exocad è un marchio registrato di Exocad GmbH, Germania.
3Shape è un marchio registrato di 3Shape A/S, Danimarca.